

Nasadzovací simulátor pre odstránenie stolice

Objednávací kód: **4109.M169**



Cena bez DPH

1.588,00 Eur

Cena s DPH

1.905,60 Eur

Parametre

Množstevná jednotka

ks

- rozměry balení: 25 x 54 x 24 cm
- doplňky: pásek, umělý exkrement, lubrikant (silikonový olej), úložný kufřík
- jemný materiál použitý na modelu dělá výuku odstránění stolice velmi realistickou
- vložení umělé stolice:
 - umělá stolice se dá lehce zavést a použít opakovaně
 - 1.vyjměte kryt z horní části simulátoru; aby se dal snadněji odstranit, stlačte jej na obou stranách a vyjměte ven
 - 2.vezměte vhodnou velikost umělé stolice a zaveďte ji do simulátoru (rektální oblasti)
 - 3.nasadte zpět kryt do simulátoru; stlačte jej tak, aby byl zarovnaný s povrchem simulátoru
- upozornění:
 - 1.během výuky používejte gumové rukavice; okolí řitního otvoru je vyrobeno z materiálu, který se může snadno ušpinit
 - 2.řitní část lze vyjmout a vyčistit; po jejím odstránění vyjměte vložku a omyjte neutrálním čisticím prostředkem (nepoužívejte rozpouštědla, jako je např. benzín nebo ředidlo, které by mohly model zničit)
 - 3.poznámky vytvořené inkoustovým nebo kuličkovým perem nebo značkovači se z modelu nedají odstranit
 - 4.používejte pouze dodanou syntetickou stolicí a lubrikant, jiné produkty mohou změnit kvalitu materiálu
 - 5.výuka na tomto simulátoru je na vysoké úrovni, ale nezaručuje uživateli dosažení stejných výsledků jako při skutečném ošetření
 - 6.pro zlepšení výrobku, mohou být bez předchozího upozornění některé části změněny
- uložení:
 - 1.pro čištění anální oblasti používejte neutrální čisticí prostředek; model osušte jemným hadříkem do sucha a uložte
 - 2.model vložte do kufříku a nechte v místě bez přímého slunečního světla, vysoké teploty a vlhkosti