

61140 - Trenažér pro opravu perinea ve střední linii

Objednávací kód: **4104.61140**



Cena bez DPH

896,00 Eur

Cena s DPH

1.084,16 Eur

Parametre

Pôrodnictvo, gynekológia - filter

Bežné gynekologické a pôrodnické úkony

Množstevná jednotka

ks

- Všetchny základní vrstvy tkáně mohou být opakovaně sešity
- Měkká kůže s podobným odporem a pevností jako lidská kůže
- Lze použít společně s porodním simulátorem PROMPT Flex, a to umístěním trenažéru vpředu, aby se zvýšila realističnost.
- Rychlé a snadné nastavení během tréninku
- K dispozici jsou svorky pro upevnění trenažéru pro opravu perinea ve střední linii k desce stolu
- Trenažér je kompaktní a snadno přenosný

ZÍSKANÉ DOVEDNOSTI

- Rozpoznávání vnitřní anatomie
- Manipulace s tkáněmi a jehlami
- Provádět falešnou infiltraci (podávání lokální anestezie, doporučujeme provádět "nasucho", bez tekutiny).
- Hluboké svalstvo, podkožní a povrchové šití
- Oprava perineální trhliny 2. stupně
- Technika válení pilířů pro určení klasifikace poranění

ČIŠTĚNÍ

- Pokud by bylo nutné trenažér vyčistit, použijte na plastové části měkký vlhký hadřík.
- Materiálovou část tohoto trenažéru nenamáčejte.

BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY

- Tento výrobek neobsahuje latex
Neprovádějte procedury, aniž by byl trenažér bezpečně připevněn k pracovnímu stolu nebo tréninkové stanici.
- Do trenažéru nepřivádějte kapaliny ani gely
- Dbejte na opatrnost při odstraňování stehů pomocí malých ostrých nůžek nebo skalpelu a dbejte na to, abyste přerušili pouze cvičné stehy, nikoliv integrální stehy.