

61141 - Trenažér pro mediolaterální opravu perinea

Objednávací kód: **4104.61141**



Cena bez DPH

896,00 Eur

Cena s DPH

1.084,16 Eur

Parametre

Pôrodnictvo, gynekológia - filter

Bežné gynekologické a pôrodnické úkony

Množstevná jednotka

ks

- Všetchny základní vrstvy tkáně mohou být opakovaně šité
- Měkká kůže s podobným odporem a pevností jako lidská kůže
- Lze použít společně s porodním simulátorem PROMPT Flex, a to umístěním trenažéru vpředu, aby se zvýšila realističnost.
- Rychlé a snadné nastavení během tréninku
- K dispozici jsou svorky pro upevnění trenažéru mediolaterální perineální reparace k desce stolu
- Trenažér je kompaktní a snadno přenosný

ČIŠTĚNÍ

- Pokud by bylo nutné trenažér vyčistit, použijte na plastové části měkký vlhký hadřík.
- Materiálovou část tohoto trenažéru nenamáčejte.

BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY

- Tento výrobek neobsahuje latex
- Neprovádějte procedury, aniž by byl trenažér bezpečně připevněn k pracovnímu stolu nebo tréninkové stanici.
- Do trenažéru nepřivádějte kapaliny ani gely
- Dbejte na opatrnost při odstraňování stehů. Používejte malé ostré nůžky nebo skalpel a dbejte na to, abyste přerušili pouze cvičné stehy, nikoliv integrální šití.

SIMULOVANÝ PACIENT

- Trenažéry pro perineální reparaci lze použít se simulovaným pacientem
- Používá se ve spojení s porodními modely PROMPT Flex se simulovaným pacientem.

ANATOMIE

- Vaginální sliznice
- Zbytky panenské blány
- Posteriovní fourchette
- Perineální svaly (bulbocavernosus a příčný sval prezentované společně)
- Perineální epidermis a dermis
- Anální sliznice a svěrač

ZÍSKANÉ DOVEDNOSTI

- Rozpoznání vnitřní anatomie
- Manipulace s tkáněmi a jehlami
- Provedení zkušební infiltrace (podání lokální anestezie, doporučujeme provést "suchou" infiltraci, bez tekutiny)
- Šití hluboké svaloviny, podkoží a povrchových partií
- Oprava perineální trhliny 2. stupně
- Technika válení pilířů pro určení klasifikace poranění